


NeoPulse™

BANDAGE JETABLE POUR OXYMÈTRE DE POULS

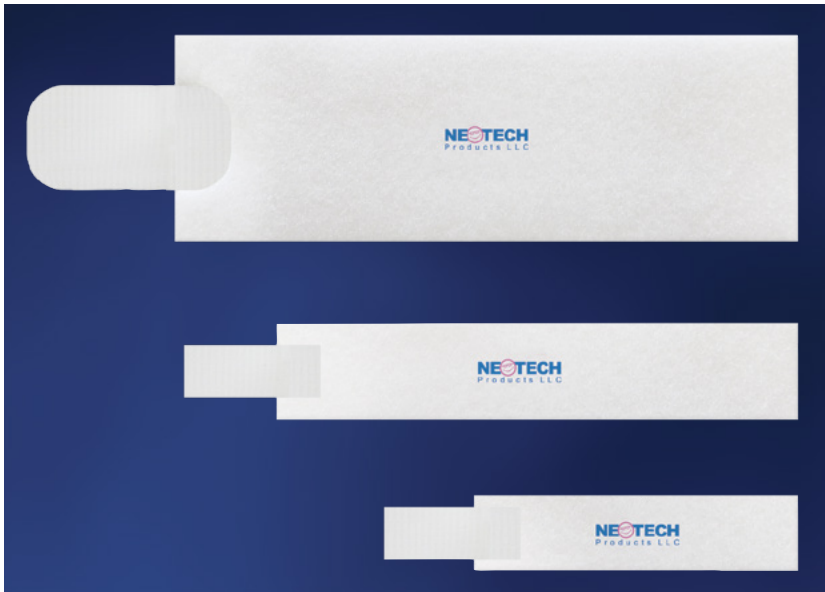

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Matériau NeoFoam® doux, respirant et hypoallergénique permettant d'évacuer la transpiration
- Léger, réglable, s'adapte à la forme du corps
- Assure confort et stabilité
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Catalogue	Taille	DIMENSIONS	QTÉ/UNITÉ
N781	Petite	3/4" x 3"	100/boîte
N782	Grande	1" x 5"	100/boîte
N783	X-Grand	2" x 6"	100/boîte

BANDAGE JETABLE POUR OXYMÈTRE DE POULS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le NeoPulse permet d'assujettir un oxymètre de pouls aux patients pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Placez le capteur de l'oxymètre de pouls conformément au protocole hospitalier.
- 2 Enroulez le NeoPulse autour du pied en emprisonnant le capteur et fixez le bandage sans trop serrer l'aide de la languette Velcro.

Remarque : la partie excédentaire du bandage peut être coupée et retirée si besoin. Vérifiez que le bandage n'est pas trop serré. La languette Velcro doit se superposer entièrement au bandage.

- 3 Une fois le bandage posé, vérifiez que la circulation du pied n'est pas entravée.
- 4 Remplacez le NeoPulse tous les cinq jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité.

Remplacez-le immédiatement s'il est visiblement sale ou usé.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Cessez l'utilisation immédiatement si une irritation cutanée se produit.

À usage unique exclusivement.