


## NeoSucker® Curved

### DISPOSITIF D'ASPIRATION ORAL ET NASAL

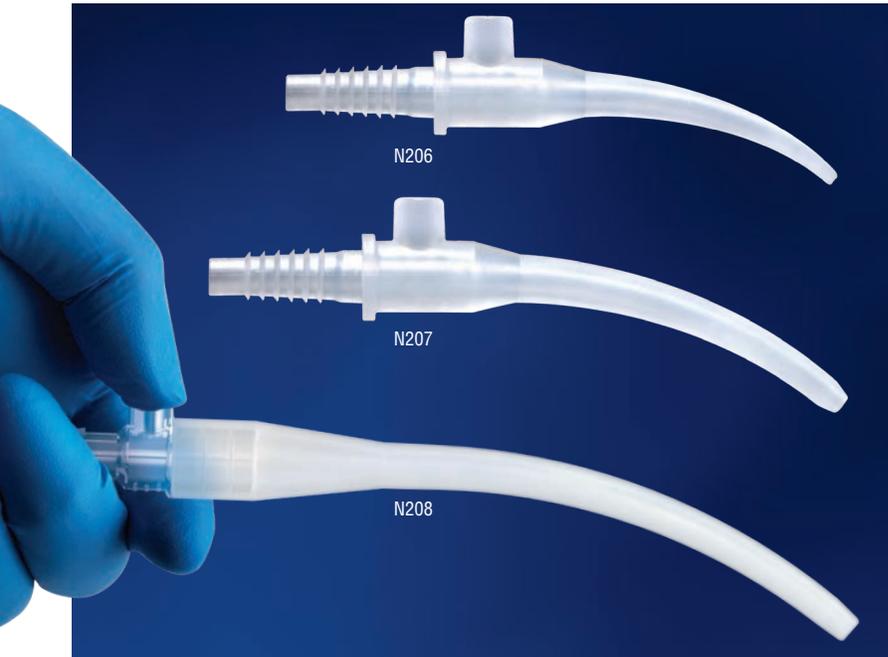

#### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Conçu pour aspirer en n'utilisant qu'une seule main
- Orifice pour le pouce pour une aspiration intermittente
- Embout doux et flexible similaire à celui d'un injecteur à poire
- N'est pas fabriqué en latex de caoutchouc naturel ou avec un plastifiant DEHP
- Emballages individuels

N° de catalogue	Taille	Unité de quantité
N206	Prématuré	50/boîte
N207	Standard	50/boîte
N208	XL	50/boîte



Brevet  
#7,635,361; #D590,056;  
#6,958,050; #D474,269

# NeoSucker® Curved

## DISPOSITIF D'ASPIRATION ORAL ET NASAL

### INDICATIONS D'UTILISATION

Le NeoSucker est un embout de tuyau d'aspiration destiné à aspirer les liquides provenant de la bouche et des narines.

### DIRECTIONS FOR USE

- 1 Raccordez l'extrémité crantée de NeoSucker à la conduite d'aspiration.
- 2 Réglez l'aspiration sur la pression appropriée conformément au protocole de l'hôpital ou aux recommandations du médecin.
- 3 Obstruez l'orifice avec le pouce pour commencer l'aspiration.
- 4 Procédez à une aspiration intermittente de la bouche ou des narines.

*Remarque: dans le cas d'une aspiration intermittente, dégagez l'orifice pour arrêter l'aspiration. Obstruez de nouveau l'orifice pour poursuivre l'aspiration.*

- 5 Aspirer de l'eau stérile par NeoSucker après chaque utilisation.
- 6 Remplacer NeoSucker toutes les 24 heures ou conformément au protocole de l'hôpital, selon la première de ces éventualités.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La vente de ce dispositif est limitée par la loi fédérale. Il doit être vendu par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin.

Pour usage oral ou nasal seulement.

L'insertion de NeoSucker trop loin dans la bouche ou les narines peut causer un traumatisme tissulaire.

L'embout d'aspiration doit toujours être exempt de débris.

À usage unique exclusivement.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M674 Rev A