


## SoftSil™

### PANSEMENT ADHÉSIF EN SILICONE

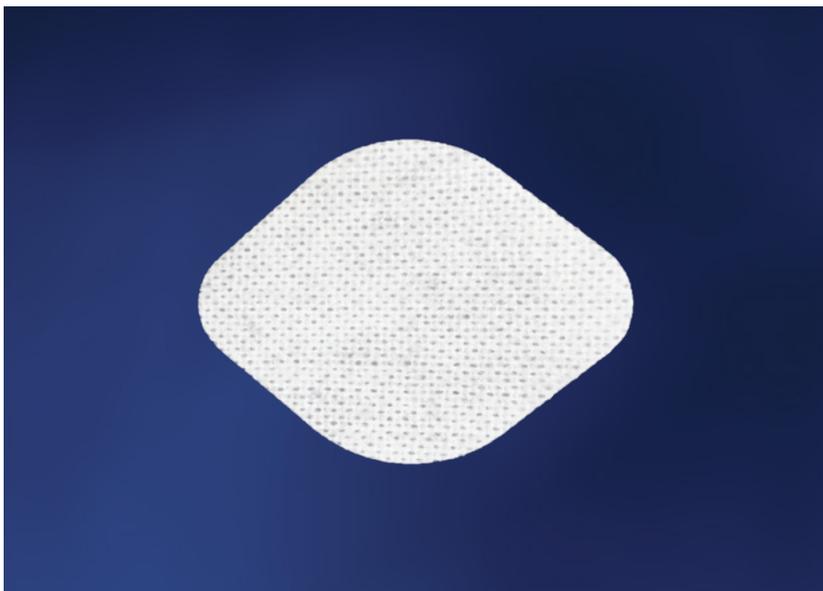

#### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Idéal comme protection ou barrière cutanée
- L'adhésif en silicone doux convient parfaitement à la peau des nouveau-nés
- Repositionnable si nécessaire
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Catalogue Article

Qté/Unité

N745

Pansement adhésif en silicone 100/boîte

## PANSEMENT ADHÉSIF EN SILICONE

### INDICATIONS D'UTILISATION

Les pansements adhésifs en silicone SoftSil sont conçus pour un usage général en tant qu'adhésif médical.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Nettoyer et sécher la peau conformément au protocole hospitalier.

*Remarque : La peau doit être aussi propre et sèche que possible. SoftSil n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.*

NE PAS UTILISER D'ALCOOL.

- 2 Enlever du film protecteur et appliquer sur la peau. Repositionner si nécessaire.

*Remarque : Peut être découpé à la bonne taille.*

- 3 Remplacer le dispositif SoftSil tous les deux jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.

Remplacer immédiatement le produit s'il est visiblement sale.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser pour fixer les appareils essentiels au maintien de la vie.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

SoftSil n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer la peau avant l'application.

À usage unique exclusivement.