


## EZCare™ Softouch

### FIXATION DE TUBE DE TRACHÉOTOMIE

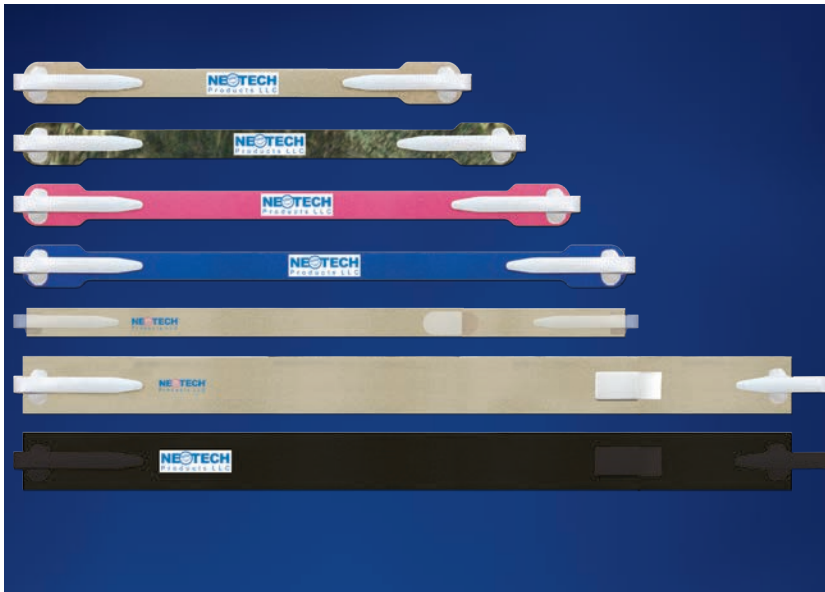

#### FONCTIONS ET AVANTAGES

- NeoFoam® Ultra épais pour une meilleure stabilité
- Le NeoFoam doux, perméable à l'air et respectueux de la peau élimine la transpiration
- Conçue pour le confort
- Légère et adaptable
- Le N926 de 18" peut être découpé à la bonne taille
- Matériau unique pour empêcher le glissement
- Exempte de latex de caoutchouc naturel et de plastifiant DEHP
- Emballage individuel

N° de catalogue	Taille	HPCPS	Unité/quantité	
N9105	12.7cm	Pièce unique	A7526	20/boîte
N9106	15.24cm	Pièce unique	A7526	20/boîte
N9107	17.78cm	Pièce unique	A7526	20/boîte
N9108	20.32cm	Pièce unique	A7526	20/boîte
N9109	22.86cm	Pièce unique	A7526	20/boîte
N9110	25.4cm	Pièce unique	A7526	20/boîte
N9111	27.94cm	Pièce unique	A7526	20/boîte
N925*	27.94cm	2 pièces (bronzage seulement)	A7526	20/boîte
N926**	45.72cm	2 pièces (bronzage seulement)	A7526	20/boîte
N926BK-10**	45.72cm	2 pièces (noir seulement)		10/pack

bronzage=TN, Camouflage=CO, Rose=PK, Bleu=BL

\*1.27cm tall

\*\*2.54cm tall



Parent a inventé



Fabriqué aux États-Unis

# EZCare™ Softouch

## FIXATION DE TUBE DE TRACHÉOTOMIE

### INDICATIONS D'UTILISATION

Le dispositif EZCare Softouch est conçu pour fixer le tube de trachéotomie d'un patient. Il est conçu pour les patients pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Mesure

Sélectionner la bonne taille à l'aide du mètre ruban EZCare Softouch fourni.

Placer la ligne de début au niveau du versant gauche et enrouler derrière le cou jusqu'au versant droit. Si la mesure est comprise entre deux tailles, essayer d'abord la plus grande.

#### Pièce unique (N9105-N9111)

- 1 Le côté lisse et blanc orienté vers le cou, introduire la languette munie d'un crochet dans le versant sur un côté de la plaque.
- 2 Tirer la languette au-dessus du versant et presser fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.
- 3 Enrouler EZCare autour du cou et introduire la languette munie d'un crochet dans le versant de l'autre côté de la plaque.
- 4 Tirer la languette au-dessus du versant et presser fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.  
*Remarque : s'assurer que EZCare est serré, mais pas trop étiré. Ajuster au besoin.*
- 5 Remplacer EZCare Softouch tous les 5 jours ou conformément au protocole de l'hôpital, en fonction du délai le plus court.

Remplacer immédiatement si la languette du crochet est usée ou si elle montre des traces de salissures visibles.

#### Deux pièces (N925-N926)

- 1 Séparer les deux pièces.
- 2 Le côté lisse et blanc orienté vers le cou, introduire la languette munie d'un crochet dans le versant sur un côté de la plaque.

- 3 Tirer la languette au-dessus du versant et presser fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.
- 4 Enrouler les deux côtés de EZCare autour du cou et les rassembler.
- 5 Définir la bonne longueur, dégager la pièce la plus longue du cou et couper l'excédent.

*Remarque : s'assurer que la peau ne soit pas exposée à la languette de fixation en tissu du crochet.*

- 6 Rassembler de nouveau les deux côtés et presser fermement la languette de fixation en tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.

*Remarque : s'assurer que EZCare est serré, mais pas trop étiré. Ajuster au besoin.*

- 7 Remplacer EZCare Softouch tous les 5 jours ou conformément au protocole de l'hôpital, en fonction du délai le plus court.

Remplacer immédiatement si la languette du crochet est usée ou si elle montre des traces de salissures visibles.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Remplacer immédiatement le produit si la languette à crochets est usée ou visiblement sale. Une languette usée peut provoquer une décanulation.

Vérifier régulièrement pour éviter tout déglacement.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

À usage unique exclusivement.