


NeoSeal[®]

CANULE NASALE ÉTANCHE

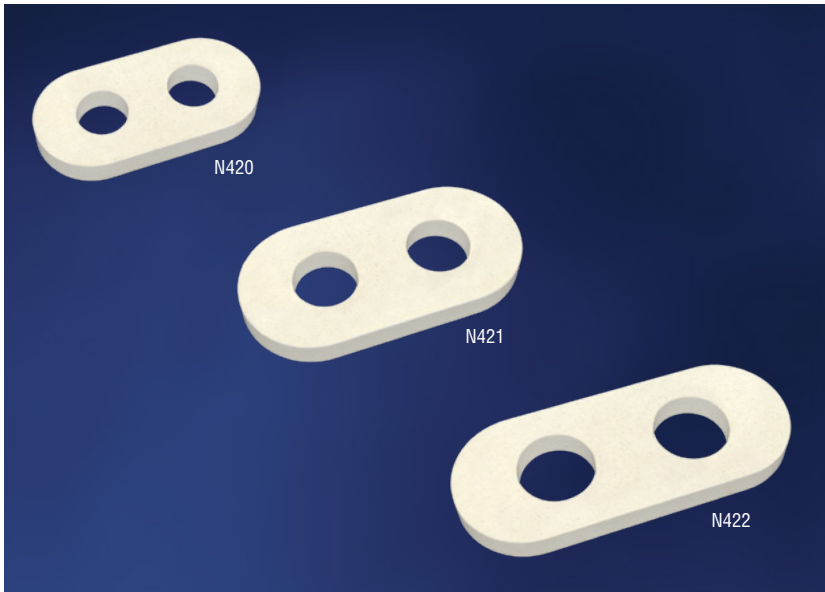

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Conçue pour améliorer l'étanchéité pour une assistance respiratoire plus efficace
- Protège la peau du septum et des narines
- Compatible avec la plupart des canules nasales
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

| Catalogue | Taille | Qté/Unité |
|-----------|--------|-----------|
| N420 | Micro | 150/boîte |
| N421 | Petite | 150/boîte |
| N422 | Grande | 150/boîte |

Brevet en instance

NeoSeal®

CANULE NASALE ÉTANCHE

INDICATIONS D'UTILISATION

Le dispositif NeoSeal est conçu pour assurer l'étanchéité autour des narines et pour protéger la peau du septum et des narines. Il est conçu pour les patients pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INDICATIONS D'UTILISATION

- 1 Retirer le NeoSeal du film protecteur.
- 2 Glisser les pinces nasales avec l'adhésif face à la canule.

Remarque : La partie lisse et souple, sans adhésif doit être en contact avec la peau du patient.

- 3 Placer la canule conformément au protocole hospitalier.
- 4 Remplacer le NeoSeal tous les jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.

Remarque : Remplacer immédiatement le produit s'il est sale ou mouillé.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Risque d'étouffement. Le NeoBar ne peut être utilisé que lorsque le patient est sous la surveillance continue et directe de professionnels médicaux formés.

Remplacer immédiatement le produit s'il est sale ou mouillé.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

À usage unique exclusivement.

