

## NeoSmile™

### PROTECTION POUR SONDE THERMIQUE



#### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Base hydrocolloïde hypoallergénique NeoBond®
- Pouvoir adhésif longue durée
- Le revêtement réfléchissant permet de protéger contre la chaleur ambiante et rayonnante
- Imprimé smiley
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP

Catalogue	Taille	Qté/Unité
N731	1" Diamètre	150/boîte



### INDICATIONS D'UTILISATION

Le NeoSmile permet d'assujettir une sonde thermique et de la protéger.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Préparation

Nettoyez et séchez la peau conformément au protocole hospitalier.

*Remarque : il est important de maintenir la peau aussi propre et sèche que possible. Les supports NeoSmile n'adhèrent pas correctement à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent également l'adhérence plus difficile.*

**N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL.**

#### Application

- 1 Avant de retirer le film protecteur, réchauffez le NeoSmile dans vos mains pendant 60 secondes. Vous pouvez également le placer sous un incubateur chauffant ou un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirez et jetez le film protecteur. Posez le NeoSmile afin de couvrir la sonde et la peau, puis maintenez-le en place pendant 60 secondes pour garantir une bonne adhérence.

#### Retrait

- 1 Remplacez NeoSmile tous les cinq jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité.
- 2 Imbibez le NeoSmile d'eau ou de solution physiologique.
- 3 Décollez doucement le NeoSmile de la peau, tout en appliquant un tampon imbibé d'eau ou de solution saline.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Cessez l'utilisation immédiatement si une irritation cutanée se produit.

Le NeoSmile n'adhère pas correctement à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent également l'adhérence plus difficile.

N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer la peau avant application.

Ne réutilisez pas le produit et ne le réappliquez pas.

À usage unique exclusivement.