


## NeoSpoon™

### CUILLÈRE À MESURER JETABLE

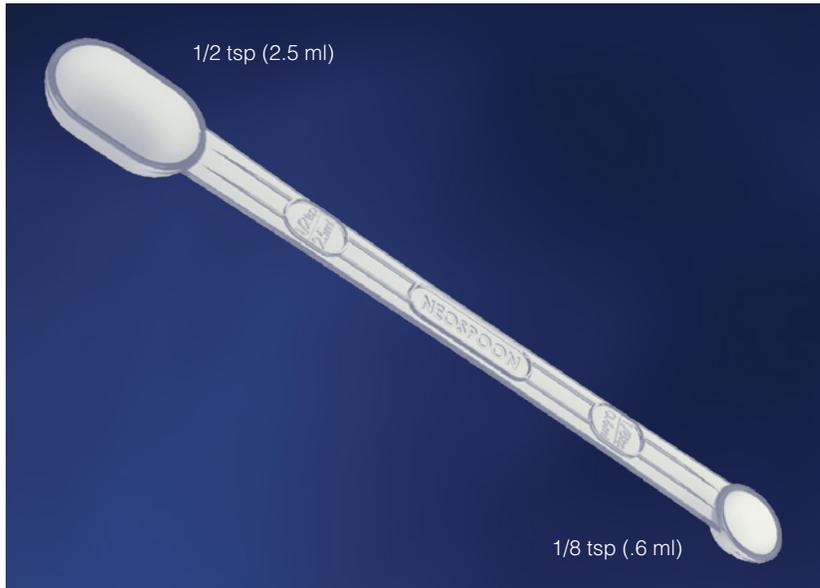

#### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Double cuillère de 1,8 ml et 7,4 ml (1/8 et 1/2 c. à s.)
- Conçue pour mesurer rapidement et précisément
- Permet d'administrer un volume précis par dose de 1,8 ml
- Idéale pour les préparations à ingérer
- Matériau biodégradable respectueux de l'environnement
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Catalogue	Le volume	Qté/Unité
N761	1/8 & 1/2 tsp	100/boîte



# NeoSpoon™

## CUILLÈRE À MESURER JETABLE

### INDICATIONS D'UTILISATION

La NeoSpoon est un dispositif de mesure.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1 Servez une cuillère rase de substance.

*Remarque : la cuillerée servie ne doit pas être bombée sous peine d'une mesure inexacte.*

2 Continuez la mesure de la substance jusqu'à disposer de la quantité souhaitée.

*Remarque : n'utilisez pas la même NeoSpoon pour des substances différentes.*

3 Jetez la NeoSpoon après usage.

*Remarque : si vous avez mesuré une substance dangereuse, jetez la NeoSpoon dans un conteneur réservé aux déchets dangereux*

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Si vous avez mesuré une substance dangereuse, jetez la NeoSpoon dans un conteneur réservé aux déchets dangereux.

Réservé à la mesure unique d'une substance donnée.

